

JUNIOR



**Der erste ergonomische
Pilleneingeber für Kälber.**

**wissenschaftlich
geprüft**

Was ist JUNIOR?

Der erste ergonomische Pilleneingeber für Kälber. Handlicher und sanfter.

Wofür ist der JUNIOR?

Saugkälber.

Was ist ergonomisch?

Der JUNIOR ist gebogen, wie der Weg durch die Maulhöhle zum

Schlund.

Der Kelch des JUNIOR ist rund.

Was ist handlicher?

Der JUNIOR liegt besser in der Hand. Kein Umgreifen erforderlich.

Wie anwenden?

Pille in den Kelch einsetzen. Mit einer Hand über den Nasenrücken in den zahnfreien Kieferrand fassen.

Gaumen kitzeln, bis das Kalb das Maul von selber öffnet. Mit der anderen Hand JUNIOR vorsichtig in die Maulhöhle schieben. Vorsichtig über den Zungengrund hinweg schieben. Pille freigeben.

Wie reinigen?

Mit fließendem heißen Wasser abspülen.



Gaumen kitzeln bis das Maul öffnet.



Eingeber vorsichtig einschieben.



JUNIOR. Ergonomisch.

JUNIOR. Wissenschaftlich geprüft.

JUNIOR. Handlicher und sanfter.



VUXXX
DER PILLENSPEZIALIST

Von-Herz-Straße 47
26871 Papenburg (DE)

T. +49 (0) 49 61.98 28 8-0
F. +49 (0) 49 61.98 28 8-24

office@vuxxx.eu
www.vuxxx.eu

